

НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАКОНА С ЛОКТЕВЫМ РЫЧАГОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Держатель предназначен для подачи мелких порций (2,5 мл) моющих и дезинфицирующих средств (кожные антисептики, жидкое мыло) из пластмассовых флаконов для мытья или дезинфекции рук в специализированных помещениях лечебно-профилактических учреждений любого профиля, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, детских учреждениях, предприятиях пищевой промышленности, местах общественного пользования, в быту и т. д.

Держатель создает удобство пользования, снижает расход моющих или дезинфицирующих средств, а также обеспечивает повышение санитарно-гигиенических требований по сравнению с наливом из флаконов.

Держатель оборудован локтевым рычагом, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» от 18 мая 2010 г. (с изменениями на 10 июня 2016г).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ручной привод дозирующего устройства
2. Режим работы – многократный, циклический.
3. Усилие нажатия на рычаг от 5Н (0,5кг).
4. Масса устройства 0,3 кг.
5. Габаритные размеры: 230х60х80

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Держатель флакона локтевой	1 шт.
2.	Шуруп с дюбелем	2 шт.
3.	Руководство по эксплуатации	1 шт
4.	Коробка	1 шт. (на 20 держателей)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепите держатель на стене при помощи входящих в комплект шурупов (разметка крепежных отверстий показана на схеме).

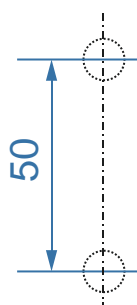


Схема крепежных отверстий

Перед установкой держателя обратите внимание на следующее:

- держатель должен быть расположен над раковиной или поддоном для стекания капель с мокрых рук;
- под держателем должно быть свободное пространство не менее 22 см для установки и удаления флакона;
- над держателем должно быть свободное пространство не менее 3 см для снятия его со стены;
- рекомендуемая высота подвеса держателя 130-135 см от пола до верха корпуса.

УСТАНОВКА ФЛАКОНА

1. Открутите/снимите крышку дозатора с флакона (рис. 1)
2. Просуньте снизу через отверстие выступа горлышко флакона и, удерживая его, накрутите на резьбу горлышка крышку дозатора (рис.2- рис. 3)
3. Произведите несколько нажатий на рычаг для заполнения насосной системы, до появления первой порции жидкости из дозатора (рис.4). После этого устройство готово к работе.

*Нажатие на рычаг при хирургической обработке рук производить только локтем.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте наружные поверхности держателя теплой мыльной водой. При необходимости наружные поверхности обрабатывайте дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению на территории РФ.

После чистки и дезинфекции вытирайте наружные поверхности дозатора насухо. Не используйте абразивные средства для чистки дозатора.

При использовании жидкого мыла возможно засорение клапанов дозатора. Для промывки дозатора, необходимо разобрать флакон с дозатором, залить во флакон горячую воду (60-70°C) и произвести многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы дозатора.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации держателя 18 месяцев со дня продажи.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет держатель по предъявлению настоящего руководства с отметками о дате продажи. По окончании гарантийного срока осуществляет ремонт при условии оплаты его стоимости.

Гарантия предприятия-изготовителя не распространяется на дефекты, причиной которых послужили:

- несоблюдение покупателем правил эксплуатации и технического обслуживания держателя, в том числе – использование не по прямому назначению или для работы с непредусмотренным сырьем;
- механическое, химическое или иное постороннее воздействие, не предусмотренное условиями эксплуатации;
- самостоятельное, несогласованное с предприятием-изготовителем, переоборудование держателя, внесение в его конструкцию изменений или самостоятельный ремонт.
- В случае использования держателя третьим лицом, ответственность за соблюдение им требований, установленных настоящим руководством, несет сам покупатель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настенного держателя флакона с локтевым рычагом

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ года

Отметка ОТК